

P-BAG – URINBEHÅLLARE FÖR MÄN OCH KVINNOR

P-BAG är den perfekta ersättningen för bäcken och urinflaskan på sjukhus, ålderdomshem, vårdhem eller i hemvården.

P-BAG är en urinbehållare med en anatomiskt utformad tratt som möjliggör att även kvinnor kan använda urinbehållaren. P-BAG är mycket enkel att använda.

P-BAG består av en återanvändbar tratt (för samma person) med en glatt yta som innebär att urinen glider ner och in i påsen. Påsen är, liksom tratten, tillverkad av polyetylen (PE) och rymmer upp till 1.5 liter vätska

Påsen är antingen blå (avsedd för ålderdomshem och hemvård) eller vit med blå markeringar som möjliggör urinmängd bestämning i 100ml steg (sjukhus och vårdhem). P-BAG kan också vägas för en mer exakt volymbestämning, P-BAGen själv väger 50 gram inklusive tratt.

Påsen har en inbyggd backventil som förhindrar att urin läcker ut och samtidigt ser till att urinlukten stannar i påsen. Det är därför inte nödvändigt, som i fallet bäcken och urinflaska, att tömma påsen efter användandet. Rengöring faller också bort, P-BAG töms efter 24 timmars användning.



Vad har bäcken och urinflaska gemensamt

Under en lång tid har gamla människor, handikappade människor och människor som av någon anledning inte kan lämna sin säng, varit tvungna att använda olika sorters urinbehållare för sina dagliga behov. Idag heter produkterna bäcken och urinflaska.

Bäcken och urinflaska:

- är öppna kärl som innebär en stor risk för att urin spills under hanteringen.
- är obekväma för patienten. På grund av kärlets öppna konstruktion, sprids urinlukten snabbt i omgivningen.
- måste tömmas & rengöras snarast efter användandet. Flera patienter kan samsas om samma bäcken/-urinflaska.

Var kan man använda P-BAG

- på sjukhus,
- på ålderdomshem och vårdhem,
- under transport av patienter,
- under utflykter med gamla och handikappade personer.

... detta innebär att P-BAG kan användas på platser där användandet av bäcken eller urinflaska är svårt eller omöjligt på grund av svårigheterna att förvara urin i öppna kärl samt svårigheterna att tömma och rengöra dessa kärl.

Miljöaspekter på P-BAG

P-BAG (tratt och påse) tillverkas i den miljövänliga plasten polyetylen (PE). Det betyder att P-BAG kan kastas i vanligt avfall efter tömning. Om P-BAG bränns bildas 65 % H₂O (vattenånga) och 35 % CO₂ (koldioxid).

Hur man använder P-BAG

Trattens handtag skall vara på övre sidan av påsen. Män använder P-BAG som om det vore en urinflaska.

Kvinnor placerar trattens kant strax under urinrörets mynning och trycker försiktigt tratten in mot kroppen. Trattens handtag skall peka ut från kroppen. För att säkerställa ett fritt flöde in i påsen skall man se till att påsen inte är vikt.

Efter urinering skall tratten hållas upprätt så att de sista dropparna kan rinna ner i påsen.

Fram till nästa användande kan P-BAG hängas upp på tratt handtaget eller ställas med tratten uppåt på golvet.

Innan P-BAG töms och tratten avlägsnas är det lämpligt att spola av trattens insida och utsidan av backventilen med en liten mängd vatten. P-BAG kan sen öppnas i övre vänstra hörnet vid rivmarkeringen och påsen töms enkelt utan att man kommer i beröring med urinen..

Varför skall man byta upp sig från bäcken och urinflaska till P-BAG

- P-BAG passar till både kvinnor och män
- P-BAG har en backventil som förhindrar att urin läcker ut. Ventilen förhindrar också spridning av urinlukt.
- P-BAG är enkel att använda och bekväm för patienten, den ger även en bättre personlig integritet.
- P-BAG förbättrar arbetsmiljön för personalen.
- P-BAG kan användas överallt. Risken att man spiller är minimal och det finns inget behov att tömma eller tvätta av urinbehållaren.

och

- P-BAG minskar kostnaderna i hanteringen av urin på sjukhus, ålderdomshem, vårdhem och i hemvården.

Så här kan man beställa

P-BAG finns i olika förpackningar:

Tillfällig användning: t.ex. på akutmottagningen på lasaretten och under sjuktransporter, där patienten använder P-BAG under en kort period.

Längre användning: när en patient använder P-BAG över en längre tidsperiod, kan man återanvända tratten ett flertal gånger innan den kastas.

Order nummer	Innehåll / kartong	Tillfällig/Längre
10 0005	30 trattar + 30 påsar	T
10 0006	10 trattar + 100 påsar	L
10 0007	100 trattar + 100 påsar	T

Denna produktpresentation har överlämnats av: